

Anleitung zum Verpacken einer Matratze

Sie benötigen einen haushaltsüblichen Staubsauger, eine Rolle Paketklebeband sowie die beigefügte große Plastiktüte. Eine zweite Person wäre hier sehr hilfreich. **Abb.1**

Abbildung 1

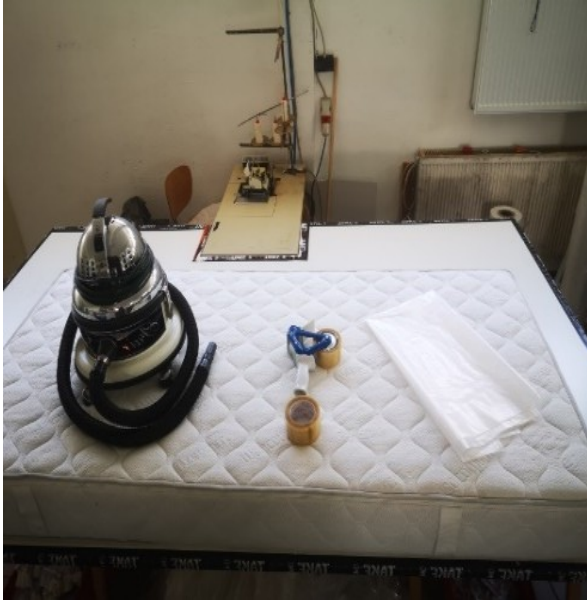


Abbildung 2



Stecken Sie die Matratze in die beigefügte Plastiktüte **Abb. 2**, falten bzw. rollen Sie das Plastik an der offenen Seite ein und versuchen Sie diese so gut es geht luftdicht zu verschließen. Zum verkleben nutzen Sie das Paketband. **Abb.3** und **Abb.4**

Abbildung 3



Abbildung 4



Anleitung zum Verpacken einer Matratze

- 2 -

Verschließen Sie eine Ecke **Abb.5** und lassen an der anderen Ecke eine kleine Öffnung **Abb.6** damit hier der Schlauch des Staubsaugers eingeführt werden kann. **Abb.7**

Abbildung 5



Abbildung 6



Der Schlauch des Staubsaugers muß eng an die Matratze gedrückt werden. Verschließen Sie mit Ihrer Hand die Öffnung zwischen Staubsaugerschlauch und Plastiktüte damit ein Vacuum entstehen kann. **Abb.8**

Abbildung 7



Abbildung 8



Anleitung zum Verpacken einer Matratze

- 3 -

Schalten Sie den Sauger ein **Abb.9**. Wenn Sie die Höhe der Matratze auf die Hälfte reduziert haben, kann die zweite Person anfangen die Matratze fest zusammen zu rollen **Abb.10**. **Lassen**

Sie hierbei immer noch den Sauger laufen. Abb.11

Abbildung 9



Abbildung 10



Wenn Sie die Matratze komplett eingerollt haben **Abb.11** schnell die Matratzenrolle an mehreren Stellen mit reichlich Paketband umwickeln **Abb.12**

Lassen Sie dabei den Sauger die ganze Zeit noch in der Öffnung stecken und laufen.

Abbildung 11



Abbildung 12



Anleitung zum Verpacken einer Matratze

- 4 -

Jetzt erst ziehen Sie den Schlauch aus der Öffnung und verschließen diese indem Sie das Plastik der Tüte zusammen drehen und mit Paketband verkleben **Abb.13** und schon ist die gerollte Matratze fertig um sie in den beigefügten Karton zu stecken und zu verschicken. **Abb.14 Bitte den Sauger abstellen**

Abbildung 13



Abbildung 14



Wir wünschen Ihnen gutes Gelingen ☺

Copyright by Medico Vital